

Uživatelský návod

verze 1.0

Datum vydání: září 2025

Co je Sensetio?

Sensetio je chytré zařízení, které měří vodivost pokožky – tzv. elektrodermální aktivitu. Pomáhá sledovat, jak tvé tělo reaguje na stres, relaxaci soustředění a koncentraci. Pomocí aplikace v telefonu můžeš své reakce sledovat v reálném čase a lépe tak porozumět svému tělu.

V balení najdeš:

- Zařízení Sensetio (hlavní měřicí jednotka)
- Dvě elektrody
- Nabíjecí USB-C kabel

Tipy pro správné používání:

- Před měřením si umyj ruce. Odstraníš tak pot, krémy nebo jiné nečistoty, které by negativně ovlivňovaly měření.
- Pro nejlepší výsledky trénuj soustředění v klidném prostředí a bez rušivých vlivů.
- Před hraním her doporučujeme tělo zklidnit dechovým cvičením.

Jak začít?

1. Před prvním použitím nabij zařízení pomocí přiloženého USB-C kabelu.
2. Stáhni si aplikaci Sensetio do svého telefonu (k dispozici pro Android a iOS).
3. Nasad' si elektrody – na dva prsty jedné ruky (ukazováček a prostředníček).
4. Zařízení se samo zapne.
5. Otevři aplikaci, ujisti se, že máš zapnutý Bluetooth a spusť vyhledávání zařízení.
6. V případě, že se Sensetio samo automaticky nepřipojí, sundej jej a připoj pomocí USB do sítě nebo spoj elektrody kovovými plíšky k sobě. Poté odpoj a proces vyhledávání a připojování v aplikaci zopakuj.
7. Hrej a sleduj měření Relaxačního skóre na obrazovce.

Nabíjení:

- Plné nabití trvá přibližně 3 hodiny. Stav baterie je zobrazen v aplikaci.
- Během nabíjení ze sítě zařízení nepoužívej!
- Výdrž baterie je až 250 hodin běžného používání.

Aplikace Sensetio:

- Free verze je k dispozici zdarma.
- Předplatné se hradí přímo v aplikaci a zkušební verze trvá 7 dní.

Jak zařízení funguje?

Sensetio sleduje jemné změny na povrchu pokožky (její vodivost), které souvisejí s tím, jak se cítíš. Data se přenášejí přes Bluetooth do mobilní aplikace, kde můžeš naměřené hodnoty sledovat v reálném čase v podobě Relaxačního skóre.



Údržba a čištění:

- Při znečištění otírej měkkým vlhkým hadříkem.
- Neponořuj zařízení, kabely ani elektrody do vody.
- Elektrody jsou opakovaně použitelné – uchovávej je v suchu a čistotě.
- Při dlouhodobém skladování udržuj stav nabití baterie mezi 30% až 80%. Dlouhodobé skladování ve vybitém stavu může způsobit poškození baterie.



Uživatelský návod

verze 1.0

Datum vydání: září 2025

! Důležité upozornění:

- Zařízení není lékařský přístroj a neslouží k diagnostice nebo léčbě žádných poruch.
- Nefunkční zařízení nevhazuj do běžného odpadu – pošli nám jej zpět a my jej ekologicky zlikvidujeme.
- Zařízení není určeno pro děti mladší 6 let.
- U dětí mladších 15 let doporučujeme při použití dohled dospělé osoby.
- Uchovávej v suchu, mimo přímé slunce a mimo dosah malých dětí.
- Zařízení používej pouze na suché pokožce rukou.
- Nepoužívej zařízení během nabíjení ze sítě.
- Neponořuj zařízení do vody ani jej nevystavuj přímému kontaktu s tekutinami.
- Pokud se zařízení přehřeje nebo neobvykle zahřívá, ihned jej odpoj od napájení.

Technické údaje:

- Komunikace: Bluetooth LE 5.0
- Napájení: USB-C, 5V, maximálně 100 mA při nabíjení
- Akumulátor: Li-pol 502030, 3,7V, 250 mAh.
- Rozměry: 52 x 52 x 28 mm
- Měření: elektrodermální aktivita – GSR (galvanická kožní reakce)
- Provozní teplota: +10 °C až +40 °C
- Skladovací teplota: -10 °C až +50 °C
- Stupeň krytí IP 20

Řešení problémů

Problém	Řešení
Zařízení se nezapíná	Připoj zařízení do sítě a počkej než se nabije. V případě, že je zařízení nabitě, přilož měřicí elektrody k sobě tak, aby se kovové části navzájem dotýkaly.
Měření neprobíhá	Zkontroluj umístění a kontakt elektrod s pokožkou.
Zařízení se nepřipojuje	Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a zda není připojeno k jinému telefonu.
Zařízení se zahřívá	Okamžitě odpoj z napájení.
Za předplatné jsme v aplikaci zaplatili, ale není aktivní.	Zkontroluj stav předplatného přímo v Obchod Play či App Store. V sekci "Můj účet" - "Platby a předplatná" / "Historie nákupů". Přes toto rozhraní musíš mít potvrzený tarif předplatného.

Při přetrvávajících problémech pošli zařízení k nám a my se na to podíváme. Popis postupu při reklamaci je k dispozici [zde](#).

S pečlivostí vyrobeno v České republice.

Výrobce:

Sensetio Lab, s.r.o.
Šamanova 1062/8, Ostrava 700 30
IČO: 17612128

Zákaznická podpora

Web: www.sensetio.com
E-mail: hello@sensetio.com
Telefon: +420 773 094 879